

ACUVUE®

나를 찾는 자유

www.acuvue.co.kr

신속한 60초 피팅 기술!

..58 59 60!

고객만족과 안경사 전문성 극대화로 이끌어 줄
콘택트렌즈의 혁명!

안경사를 위한 신속한 피팅,
고객을 위한 정확한 시력 교정과 편안함을 위해 디자인되었습니다.



아큐브 어드밴스 난시전용

2주착용 정기교체형 콘택트렌즈

탁월한 피팅 기술과
고객이 원하는 우수한 제품으로
고객을 만족시키는 것이 진정한 전문가입니다.

현재 난시전용
콘택트 렌즈 시장은?

- 구면 렌즈 제품과 동일한 방법으로 난시 제품의 처방
- 전문적인 난시제품 처방법 부재
- 착용감과 편안함에서 소비자의 불만족



난시전용 콘택트렌즈
사업에서의 전문성

- 제품의 우수성
- 안경사의 전문성
- 안경원과 제조사의 전략적 파트너십

이제 *Johnson & Johnson* 과 함께 진정한 난시 전문가가 되어보십시오.

제품의 우수성

- 탁월한 렌즈 축의 안정성
- 선명하고 안정적인 시력교정 효과
- 하루 종일 촉촉한 편안함

안경사의 전문성

- TVCI(존슨앤드존슨 비전케어 아카데미) 교육

Johnson & Johnson Vision Care 가

난시전용 콘택트렌즈 전문성의 새로운 기준을 제시합니다

많은 난시 고객이 난시 전문가의 도움을 원하고 있습니다.

- 시력 교정 인구의 22%가 난시
- 난시가 있는 콘택트 렌즈 착용자 중 토릭 렌즈는 18%만이 착용

난시 콘택트 렌즈 시장 현황 (800,000명)



[출처 : 2004 Incidence Tracking, AC Nielsen]


난시 고객과 여러분 모두를 위한 최선의 선택,
아큐브 어드밴스 난시전용을 만나보십시오.

아큐브 어드밴스 난시전용은 이런 소비자에게 권해 주십시오.

- ▶ 토릭 병 렌즈 (일반 병 렌즈 / 6개월 ~ 1년 사용가능렌즈) 착용중이나 착용감(편안함)이 만족스럽지 않은 고객
- ▶ 토릭 병 렌즈 (일반 병 렌즈 / 6개월 ~ 1년 사용가능렌즈) 착용중이나 눈 건강을 위해 2주 착용 렌즈를 고려중인 고객
- ▶ 난시교정이 안 되는 구면 렌즈를 착용중이라 시야가 늘 뿌옇다고 하는 고객
- ▶ 난시교정 렌즈를 시도했으나 눈에 맞는 렌즈를 찾지 못해 안경 착용중인 고객
- ▶ 안경으로 난시교정을 하고 있으나 콘택트렌즈로 이미지를 업그레이드하고 싶은 고객

| 탁월한 렌즈 축의 안정성

전문가가 자신 있게 고객에게 추천할 수 있도록 디자인되었습니다.

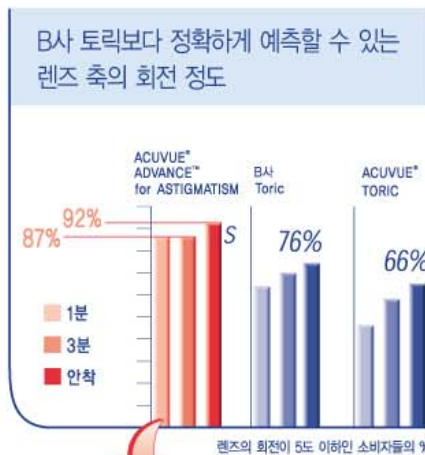


* In benchmark evaluations of ACUVUE® ADVANCE™ for ASTIGMATISM, B사 Toric and ACUVUE® TORIC

60초안에 피팅

안경사들이 인정한 제품의 우수성은 다음과 같습니다.*

- 피팅의 용이성
- 예측 가능한 축의 회전 정도
- 회전 안정성

"매우 편함/좋음"부터 "탁월함"으로 평가한 안경사들의 %

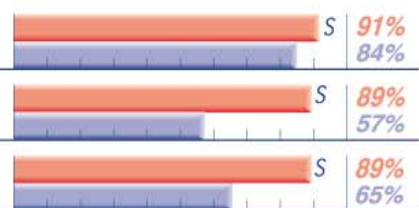

* 아큐브 어드밴스 난시전용과 B사 토릭에 대한 대규모 독립적인 임상 실험
참고: S=95% 신뢰도

■ 아큐브 어드밴스 난시전용을 피팅한 안경사들의 %
■ B사 토릭을 피팅한 안경사들의 %

[출처 : The US Toric Product Validation Study, summer~fall 2004, 600 patients]



기존 토릭 렌즈에 대해 안경사가 느끼는 불만은 무엇일까요?


토릭 렌즈에 대한 가장 큰 불만은 불안정한 축교정이라고 합니다. 이제 축의 회전을 정확하게 예측할 수 있고, 안정적인 아큐브 어드밴스 난시전용을 선택하십시오.

[출처 : 아큐브 어드밴스 난시전용 pre-launch survey, 2005년 6월, 40 ECPs]


| 선명하고 안정적인 시력 교정 효과

고객에게 가장 필요한 선명하고 안정적인 시력을 제공합니다.

고객이 느끼는
시력 교정의 우수성

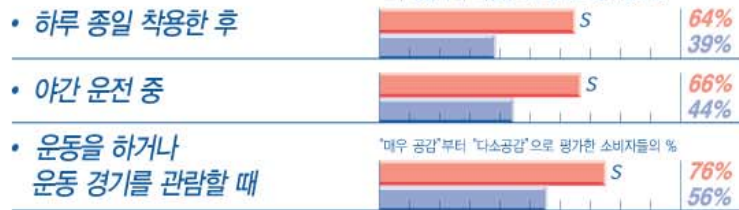


고객이 느끼는
아큐브 어드밴스
난시전용의 우수성

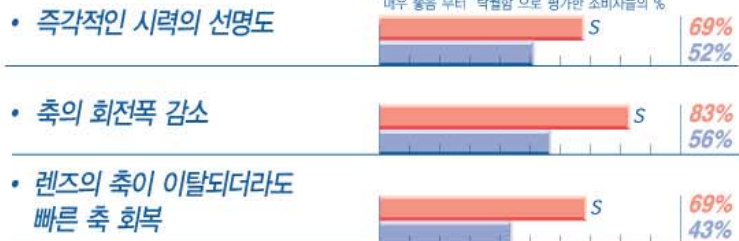

*아큐브 어드밴스 난시전용과 B시 토릭에 대한 대규모의 독립적인 임상 실험
■ 아큐브 어드밴스 난시전용을 착용한 소비자
■ B시 토릭 착용 소비자

안경사들이 느끼는
차이점도 매우 큼니다.

교정 후 시력 측정에서 B시
토릭보다 더 좋은 시력 교정 효과가
안경사들에 의해 확인되었습니다.

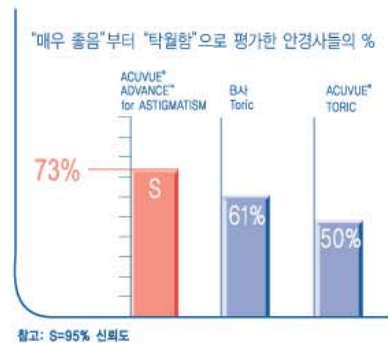

[출처 : The US Toric Product Validation Study, summer~fall 2004, 600 patients]



기존 토릭 렌즈에 대해 고객이 느끼는 불만은 무엇일까요?


많은 고객들이 선명하지 못한 교정 시력에 대해 불만이라고 이야기 합니다. 이제 고객을 위해 선명하고 안정적인 시력 교정 효과의 아큐브 어드밴스 난시전용을 선택 하십시오.

[출처 : 아큐브 어드밴스 난시전용 pre-launch survey, 2005년 6월, 40 ECPs]

| 하루 종일 느끼는 편안한 착용감

선명한 시력교정과 하루 종일 편안한 눈,
고객에게 이 두 가지 모두를 제공하십시오.

고객이 느끼는
눈의 편안함

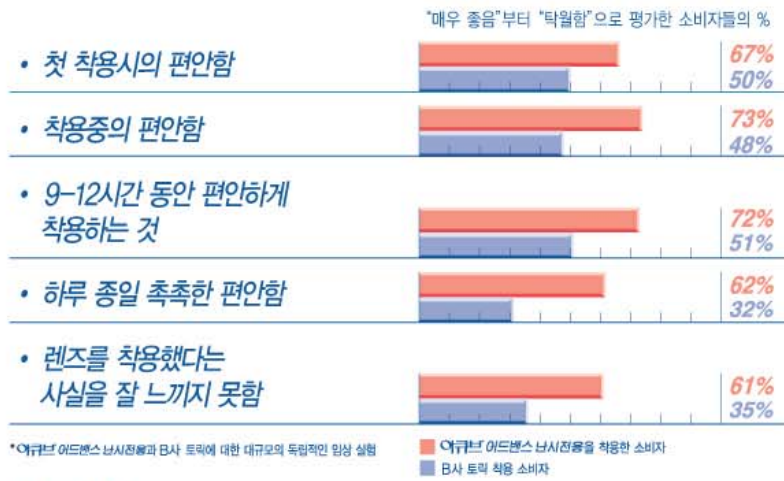

안경사들이 느끼는
차이점도 매우 큼니다.

교정 후 시력 측정에서 B사 토릭보다 더 좋은 시력 교정 효과가 안경사들에 의해 확인되었습니다.



[출처 : The US Toric Product Validation Study, summer~fall 2004, 600 patients]



기존 토릭 렌즈에 대해 안경사가 느끼는 불만은 무엇일까요?

많은 소비자가 착용감에 대한 불만족을 호소합니다. 이제 선명한 시력교정과 편안한 착용감까지 모두 만족시키는 아큐브 어드밴스 난시전용을 선택하십시오.

[출처 : 아큐브 어드밴스 난시전용 pre-launch survey, 2005년 6월, 40 ECPs]

이제 TVCI(The Vision Care Institute)와 함께 귀하의 안경원을 제품과 고객에게 모두 전문적인 난시 전문점으로 경영하십시오.

• 세계적인 수준의 교육

- 글로벌 네트워크의 선진 시스템
- 한국 실정에 맞게 도입된 글로벌 커리큘럼

• “아큐브 난시 전문점” 자격 부여

- TVCI의 전문교육을 습득한 안경원에 한해 “아큐브 어드밴스 난시전용 전문점” 자격 부여

• 실무자를 위한 전례없는 교육 시설

- 어떤 회사에서도 찾을 수 없는 규모의 안경사 실무 교육을 위한 시설

• 안경사를 위한 지식의 장

- 제조사에서 하는 제품 교육이 아니라, 안경사를 위한 콘택트렌즈와 검안에 관한 지식을 전달하는 곳



콘택트 렌즈에 관한 전문적인 교육을 받아보셨습니까?

많은 안경사분들이 특히 난시용 제품에 관한 전문적 교육이 필요하다고 이야기합니다.

아큐브® 어드밴스 난시전용의 비교할 수 없는 기술력


- 탁월한 렌즈축 안정성 • 선명하고 안정적인 시력 교정 효과 • 하루 종일 편안한 착용감

선명하고 안정된 시력교정 - ASD(Accelerated Stabilization Design)

아큐브® 어드밴스 난시전용은 ASD(Accelerated Stabilization Design)라는 깜박이는 눈의 힘을 이용한 혁명적인 디자인을 사용했습니다. ASD 디자인이 적용된 아큐브® 어드밴스 난시전용은 일을 하거나, 운전이나 운동을 할 때, 또는 TV를 볼 때도 렌즈가 정확한 위치에 가도록 함으로써 하루종일 또렷하고 안정적인 시력을 제공합니다.

안정성의 혁명

- 안정성을 구현한 기술
 - 렌즈와 눈 깜박임의 다이내믹스에 대한 깊은 이해
 - 하이 테크 제조 기술
- 최적화된 디자인 요소
 - 두께의 경사
 - 두께의 높이
 - Active zone의 사이즈

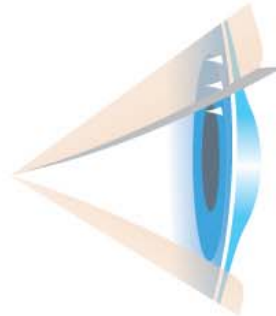


눈을 뜬 상태에서는
렌즈와의 상호작용이
없습니다.


* 본 일러스트는 정확한
렌즈 표면에 대한 묘사가 아님.

깜박이는 눈의 자연적인 압력을 이용

- 눈을 뜬 상태에서, 얇은 부분(thin zone)은 눈꺼풀 아래에 위치합니다.
- 눈을 뜬 상태에서, 두꺼운 부분(thick zone)은 눈꺼풀에 닿지 않는 부분에 위치하여, 렌즈가 자리를 잡을 수 있도록 도와 줍니다.
- 깜박이는 눈의 자연적인 압력 이용
- 눈 깜박임은 위치를 벗어난 렌즈가 자리를 잡을 수 있게 해 줍니다.

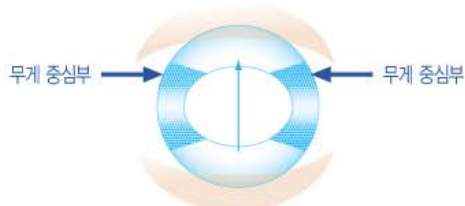

축이 제대로 피팅되면, 눈꺼풀 아래 렌즈 두께에
변화가 없습니다. : 렌즈가 안정된 상태로 유지됩니다.

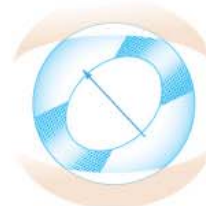

축이 제대로 피팅되지 않으면, 두꺼운 부분이 눈꺼풀에 의해
이동합니다. : 렌즈가 빠르게 0도 위치로 회전합니다.

비교할 수 없는 편안함 - HYDRACLEAR™

HYDRACLEAR™ - '아침부터 밤까지 촉촉한 편안함'

눈 건강과 뛰어난 착용감에 대한 아큐브의 노력이 독자적인 기술 **HYDRACLEAR™**로 실현되었습니다.
HYDRACLEAR™ 기술로 아큐브 어드밴스는 우수한 재질과 함께 촉촉한 습윤인자가 어우러져
눈에 언제나 깨끗한 시야와 촉촉한 느낌을 선사합니다.



아침부터 밤까지 촉촉한 편안함을 제공하는
HYDRACLEAR™ 기술



뛰어난 착용감에 대한 노력이 아큐브만의 독자적인 기술 **HYDRACLEAR™**으로 구현되었습니다.
HYDRACLEAR™은 아큐브만의 기술에 대한 브랜드 명으로 우수한 렌즈의 기본 재질과 더불어 놀랄만큼 촉촉한 습윤 인자가 어우러져 깨끗하고 촉촉한 렌즈를 구성하였으며 이를 통해 독특하면서도 실크와 같은 부드러운 느낌을 제공합니다.

The new ULTRA COMFORT SERIES™



아큐브 어드밴스 난시전용



아큐브 어드밴스 근시용

- 아침부터 밤까지 촉촉한 편안함
- 부드럽고 유연한 느낌
- 2주 착용 렌즈
- 6개입
- 자외선차단 1등급 (UVB 99%, UVA 95%)

ULTRA COMFORT SERIES™ 는 계속됩니다!

아큐브® 어드밴스 난시전용

제품 세부사항

재 질	galyfilcon A
직 경	14.5 mm
베이스 커브	8.6mm
함 수 율	47%
자외선 차단	Class 1(99% UVB, 95% UVA차단)
착용기간	2 Week Daily Wear
제조공법	HYDRACLEAR™
디 자 인	ASD (Accelerated Stabilization Design), 후면토릭
Oxygen Flux	97%
DK / T	85.7(0.07mm CT)
식별 컬러	Blue Handling Tint
Rotation (scribe) marking	6시, 12시 방향
수 량	6 lenses

주문가능 도수범위

Sph.	Cyl.	Axis	
		일 반 주 문	특 별 주 문
+0.25 ~ +6.00 (0.25 step)	-0.75 / -1.25 / -1.75		10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180
0.00 ~ -0.75 (0.25 step)	-0.75 / -1.25 / -1.75	90, 180	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170
-1.00 ~ -6.00 (0.25 step)	-0.75 / -1.25 / -1.75	10, 20, 90, 160, 170, 180	30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150
-6.50 ~ 9.00 (0.50 step)	-1.25 / -1.75	10, 20, 90, 160, 170, 180	70, 80, 100, 110